

# Инструкция по применению медицинского изделия

## Средство барьерно-защитное с наносеребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и слизистых

### Регистрационное удостоверение

№ РЗН 2021/15185 от 20.08.2021 г.

**Описание.** Средство барьерно-защитное с наносеребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и слизистых (далее по тексту АРГЕНСЕПТ) представляет собой прозрачную жидкость нежно-желтого цвета без запаха. Основным действующим веществом антисептического средства АРГЕНСЕПТ являются наночастицы серебра 999,9 пробы, образующие коллоидный раствор в дистиллированной воде, не содержащей токсичных побочных продуктов в виде солей серебра.

### Состав на 100 мл:

Вода дистиллированная – 99,99%

Нанокластеры серебра < 0,01%

Карбоксиметилцеллюлоза натрия (Секол 2000) – 0,01%.

**Формы выпуска:** АРГЕНСЕПТ выпускается в 3-х вариантах исполнения:

- Средство барьерно-защитное с наносеребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и слизистых, флакон 10 мл;
- Средство барьерно-защитное с наносеребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и слизистых, флакон 30 мл;
- Средство барьерно-защитное с наносеребром «АРГЕНСЕПТ» для кожи и слизистых, флакон 50 мл.

**Показания к применению.** Профилактика возникновения и развития воспалительных процессов на неповрежденных коже лица и тела, а также слизистых полости рта, носоглотки, глаз и уха, в том числе имеющих признаки раздражения и воспаления, после воздействия патогенной микрофлоры и вредных факторов окружающей среды путем формирования противомикробного барьера за счет создания на поверхности кожи и слизистых тончайшей микропленки с наночастицами серебра, обладающего антисептическим действием.

**Способ применения:** АРГЕНСЕПТ может применяться в виде закапываний и спрей-распылений по рекомендации врача в лечебном учреждении или самостоятельно в домашних условиях.

Средство АРГЕНСЕПТ во флаконе 10 мл применяется для профилактики воспаления в офтальмологии (после ношения контактных линз в течение дня, купания в водоемах и бассейнах, при попадании различных видов патогенной флоры или загрязнений слизистой глаз), в оториноларингологии – при риске инфицирования слизистых носа, носоглотки и уха путем закапывания 2–3-х капель от 3-х до 6-ти раз в день, в течение 3-15 дней.

Средство АРГЕНСЕПТ во флаконах 30 мл и 50 мл применяется в стоматологии, дерматологии, комбустиологии, гериатрии, косметологии, хирургии, педиатрии с целью антисептического воздействия и предотвращения воспаления путем спрей-распылений 1–3-х доз на кожу и слизистые оболочки от 3-х до 5-ти раз в день, в течение 3–15 дней.

**Противопоказания:** Повышенная чувствительность и аллергические реакции на препараты серебра.

Исследований влияния изделия на беременность и период грудного вскармливания, а также по взаимодействию изделия с другими лекарственными препаратами не проводились.

**Условия хранения:** Хранить в защищенном от света месте при температуре от +5°C до +30°C, в местах недоступных для детей.

**Способ утилизации:** В порядке, предусмотренном СанПиН 2.1.3684-21 для медицинских отходов класса А.

**Срок годности:** 3 года с даты изготовления, указанной на упаковке.

### Гарантии предприятия – изготовителя:

Раствор наносеребра коллоидный «АРГЕНСЕПТ» изготовлен, испытан и упакован в соответствии с ТУ 32.50.50-004-13034791-2019. Предприятие – изготовитель гарантирует качество изделия до истечения указанного срока годности при соблюдении целостности первичной упаковки, порядк применения, условий транспортировки и хранения.






### Производитель / Прием претензий:

ООО "Лаборатория Аргентум"

Россия, 111399, г. Москва, Федеративный проспект д.24, пом. XLIII, ком 5.

E-mail: sales@argenlab.ru

### Расшифровка знаков:

	–	Использовать до ....
	–	Серийный номер
	–	Дата изготовления
	–	Обратитесь к инструкции по применению
	–	Не использовать при повреждении упаковки